



Bitte lesen Sie diese Informationen vor Gebrauch sorgfältig durch.

## Anwendung: Tragen der Community-Maske in der Öffentlichkeit



Achtung!



Maske beim Tragen nicht berühren!




Maske nicht auf der Stirn tragen  
oder um den Hals hängen!

### Zu Ihrer Sicherheit

- Halten Sie sich beim Anlegen und Abnehmen der Maske an die nachfolgende Beschreibung.
- Sie sollten sich beim Ein- und Ausatmen nicht unbehaglich fühlen.
- Die Maske kann maximal 4 Stunden verwendet werden.
- Masken, die einen Fehler aufweisen, nicht verwenden.
- Masken nicht mit Desinfektionsmittel reinigen.
- Wiederverwendbare Masken müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
- Bitte beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise.
- Bitte beachten Sie, dass Community-Masken keine Medizinprodukte und keine Artikel der persönlichen Schutzausrüstung im Sinne der Vorgaben in der Europäischen Union sind.

### Anlegen der Community-Maske

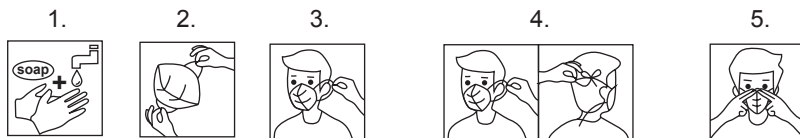

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich.
2. Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und halten Sie diese nur an den Bändern.
3. Ziehen Sie die Maske über Mund, Nase und Kinn.
4. Befestigen Sie die Schlaufen hinter den Ohren oder am Kopf.
5. Prüfen und verbessern Sie die Position.

### Absetzen der Community-Maske



1. Entfernen Sie die Maske durch Abnahme der Bänder. Vermeiden Sie eine Berührung mit der Innen- und Außenseite der Maske.
2. Wiederverwendbare Masken müssen nach jedem Gebrauch gewaschen werden.  
Bitte beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise.
3. Waschen Sie Ihre Hände gründlich.

### Pflege und Entsorgung

- Reinigen durch Sterilisation über einem Wasserdampfbad. Danach auf einer sauberen Fläche trocknen lassen.
- Waschen in der Waschmaschine oder von Hand (mind. 60°C).  
Bitte beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise.
- Die Maske kann über den Hausmüll entsorgt werden.