



Bitte lesen Sie diese Informationen vor Gebrauch sorgfältig durch.

Anwendung: Tragen der Einwegmaske in der Öffentlichkeit



Achtung!



Maske beim Tragen nicht berühren!



Maske nicht auf der Stirn tragen
oder um den Hals hängen!

Zu Ihrer Sicherheit


- Masken, die einen Fehler aufweisen, nicht verwenden.
- Halten Sie sich beim Anlegen und Abnehmen der Maske an die nachfolgende Beschreibung.
- Sie sollten sich beim Ein- und Ausatmen nicht unbehaglich fühlen.
- Die Maske kann maximal 4 Stunden verwendet werden.
- Einwegmasken müssen nach Gebrauch entsorgt werden.
- Bitte beachten Sie, dass diese Einwegmasken keine Medizinprodukte und keine Artikel der persönlichen Schutzausrüstung im Sinne der Vorgaben in der Europäischen Union sind.

Anlegen der Einwegmaske



1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich.
2. Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und halten Sie diese nur an den Bändern.
3. Ziehen Sie die Maske über Mund, Nase und Kinn.
4. Befestigen Sie die Schlaufen hinter den Ohren oder am Kopf.
5. Prüfen und verbessern Sie die Position.

Absetzen der Einwegmaske

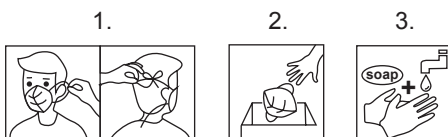

1. Entfernen Sie die Maske durch Abnahme der Bänder. Vermeiden Sie eine Berührung mit der Innen- und Außenseite der Maske.
2. Entsorgen Sie die Einwegmaske.
3. Waschen Sie Ihre Hände gründlich.

Entsorgung

Die Maske nach einmaligem Gebrauch in einer Plastiktüte über den Hausmüll entsorgen.